


# Istruzioni di ferratura

## - Informazioni utili sull'applicazione inchiodata -

L'applicazione corretta delle nostre ferrature composite è semplice, a condizione che si possiedano comprovate conoscenze e competenze necessarie per questo tipo di ferratura e che si presti attenzione ad alcuni aspetti fondamentali.

### (1) Il pareggio dello zoccolo scalzo

In sostanza, il pareggio dello zoccolo viene eseguito analogamente al pareggio dello zoccolo prima dell'applicazione delle ferrature convenzionali. È importante che l'esecuzione del pareggio avvenga a regola d'arte. Dopo la lavorazione con la raspa, l'orlo inferiore deve essere perfettamente piano e liscio.

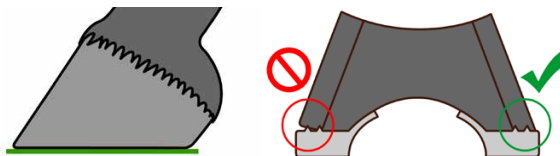

### (2) Modello e taglia adatti

Scegliere la ferratura adatta alla forma e dimensione dello zoccolo, alla temperatura ambientale (Standard o Extra) e all'uso previsto del cavallo (modello).

Per informazioni dettagliate sulla nostra gamma di prodotti, la invitiamo a consultare il nostro sito web: [www.duplo-frank.de/it/informazioni-principali](http://www.duplo-frank.de/it/informazioni-principali)



### (3) Adattamento allo zoccolo

- Per una protezione funzionale dello zoccolo l'adattamento corretto è fondamentale. A tale scopo segnare la forma dello zoccolo sulla ferratura e adattarla di seguito con l'aiuto di una smerigliatrice angolare o a nastro. È possibile anche restringere la ferratura oppure dilatarla; con l'ausilio delle nostre estensioni, è possibile renderla più lunga oppure più larga.
- Controlli la posizione degli inserti dentellati. Per cavalli sensibili con zoccoli irregolari o molto piatti, raccomandiamo di limare i dentini più interni della ferratura per evitare una pressione indesiderata sulla suola.



#### Suggerimenti per l'adattamento ottimale

- Per ridurre il rischio che il cavallo si tolga la ferratura, levigare una protezione contro il distacco nella parte posteriore.
- Se necessario, assottigliare la bordatura in gomma anziché rimuoverla, così da conservarne la funzionalità.
- La traversa in materiale sintetico può essere adattata in caso di trattamento del fettone.



Per informazioni dettagliate sull'adattamento della ferratura, la invitiamo a visitare il sito web: [www.duplo-frank.de/it/faq-adattamento](http://www.duplo-frank.de/it/faq-adattamento)

Ecco qua un video tutorial su come utilizzare il prodotto: <https://youtu.be/je7olgLdL8>

### (4) Inchiodatura e rivetto

- L'operazione di applicazione avviene con chiodi normali per ferrature convenzionali, a condizione che la testa del chiodo sia più grande del foro del chiodo. Assicurarsi di ribattere saldamente le teste dei chiodi, in modo che si incastrino nella struttura interna di metallo e garantiscano una tenuta sicura.
- Il rivetto coretto è molto importante.
- Avviso per le ferrature dotate di barbette: non dimenticare di piegare le barbette verso la muraglia dello zoccolo. Utilizzando un modello Basic è importante levigare le barbette per evitare lesioni.
- Infine, levigare la muraglia ed i chiodi rivettati.



### (5) Rimozione


- Utilizzare uno scassachiodi per aprire i ribattini. Può essere utile spingere poi il chiodo nel canale del chiodo con il lato posteriore dello scassachiodi: in questo modo scivola verso il basso e la testa del chiodo può essere afferrata più facilmente dalla parte inferiore.
- Estrarre i chiodi con una tenaglia tirachiodi. Per una presa migliore, è possibile affilare la tenaglia con il nastro abrasivo.

Si prega di consultare le nostre istruzioni di sicurezza ([www.duplo-frank.de/it/sicurezza](http://www.duplo-frank.de/it/sicurezza)) e di indossare Dispositivi di protezione individuale adeguati. Ulteriori dettagli sull'uso e sull'eventuale riutilizzo della ferratura sono disponibili online nella pagina del rispettivo prodotto. Per domande o esigenze specifiche, il nostro servizio clienti sarà lieto di aiutarvi!

### Ferrature Composite Duplo

H. Frank Kunststofftechnik GmbH  
Vorderfreundorfer Straße 20  
94143 Grainet, Germania

Tel.: +49 (0) 8585/96926-0  
Fax: +49 (0) 8585/96926-119

 [duplo\\_composite\\_horseshoes](https://www.instagram.com/duplo_composite_horseshoes)

 Duplo Composite Horseshoes

 [info@duplo-frank.de](mailto:info@duplo-frank.de)

 [www.duplo-frank.de](http://www.duplo-frank.de)

  
Ultimo aggiornamento: 10/2025